

Инструкция по применению
клея медицинского двухкомпонентного
желатино-резорцинового для хирургии сердца и сосудов, стерильного
«Биоклей-ЛАБ» по ТУ 9398-001-01897446-2003

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02270 от 18 октября 2017 года

Состав

Компонент № 1: желатино-резорциновая основа;
Компонент № 2: глутарово-формальдегидный отвердитель.

Показания к применению

«Биоклей-ЛАБ» применяется для предотвращения кровотечений из мест хирургических проколов и анастомозов, для фиксации или склеивания тканей.

Противопоказания

Установленная гиперчувствительность к белкам.

Побочные эффекты

В случаях возникновения аллергической реакции следует использовать антигистаминные препараты.

Способ применения

Количество клея зависит от размера поверхности, которую нужно зафиксировать (склеить). Для фиксации поверхности площадью 10 см² достаточно 2 мл клея.

1. Подготовка компонентов:

В общей полиэтиленовой упаковке находятся:

- Пакет с флаконом Компонента № 1;
- Пакет с флаконом Компонента № 2, тубиком и иглой канюлей для дозирования отвердителя;
- Шприц 5 мл и две иглы 18 G.

1.1 За 1-2 ч до использования упаковку с клеем необходимо вынуть из холодильника и выдержать при комнатной температуре, чтобы Компонент № 1 перешел в жидкое состояние, либо кратковременно прогреть пакет с Компонентом № 1 при 35-40 °С.

1.2 С использованием первой иглы 18 G Компонент № 1 набрать полностью из флакона в стерильный шприц 5 мл с небольшим количеством воздуха, так, чтобы обеспечить возможность последующего введения в этот шприц Компонента № 2 и смешивания этих двух компонентов.

1.3 На горловину тубика для дозирования Компонента № 2 повернуть иглу канюлю так, чтобы основание иглы прокололо мембрану на горловине тубика.

1.4 Набрать Компонент № 2 из флакона в шприц-тубик, для чего снять с иглы защитный колпачок, нажать на тубик, опустить иглу во флакон и разжать пальцы. Вынуть заполненный шприц-тубик и надеть на иглу защитный колпачок.

2. Последовательность нанесения:

2.1 Для прочности фиксации клеевой пленки на биоткани необходимо осушить место нанесения клея и нанести 1-3 капли Компонента № 2 (подслоя). **При этом прилегающие ткани рекомендуется по возможности изолировать салфетками, а избыток компонента № 2 удалить.**

2.2 Снять первую иглу со шприца с компонентом № 1 и ввести через выпускное отверстие 3-5 капель Компонента № 2.

2.3 Интенсивно встряхнуть шприц несколько раз, добиваясь получения однородной массы.

2.4 Надеть на шприц вторую иглу 18 G.

2.5 Нанести клей на фиксируемые поверхности.

2.6 Склеиваемые ткани сомкнуть и зафиксировать на 3-5 минут до полного отверждения клея. При герметизации швов выдержать клеевую пленку в течение 3-5 минут для ее отверждения.

ВНИМАНИЕ! При добавлении 3-5 капель компонента № 2 к 2 мл Компонента № 1 клей сохраняет жизнеспособность (текучесть) в течение 30-50 сек. Отверждение клея происходит через 3-5 минут.

Условия хранения

Хранить при температуре от 0 до 8°С. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.